

LOTRAFILCON B

LENTILLES DE CONTACT SOUPLES DE PORT PROLONGE ET RENOUVELLEMENT MENSUEL



NOTICE D'UTILISATION

CETTE NOTICE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE MODE D'UTILISATION DES LENTILLES AINSI QUE DES INFORMATIONS DE SECURITE. VEUILLEZ LA LIRE ATTENTIVEMENT ET LA CONSERVER AFIN DE POUVOIR LA CONSULTER ULTERIEUREMENT. LES LENTILLES DE CONTACT DOIVENT TOUJOURS ETRE ADAPTEES PAR UN SPECIALISTE. SUIVEZ LES INDICATIONS DE VOTRE SPECIALISTE ET LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE VOS LENTILLES DE CONTACT.

NOM DU PRODUIT

AIR OPTIX[®]

AIR OPTIX[®] for ASTIGMATISM

AIR OPTIX[®] AQUA

AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL

MATERIAU ET CONDITIONNEMENT

Les lentilles de contact souples AIR OPTIX[®], les lentilles de contact souples AIR OPTIX[®] for ASTIGMATISM, les lentilles de contact souples AIR OPTIX[®] AQUA, les lentilles de contact souples AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL, contiennent 67% de lotrafilcon B et 33% d'eau et sont conservées dans une solution saline isotonique tamponnée par du phosphate. Les solutions salines des lentilles de contact AIR OPTIX[®] AQUA et les lentilles de contact AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL contiennent 1% de Copolymère 845.

Les lentilles sont teintées en bleu clair pour faciliter la manipulation ; la teinte contient de la phthalocyanine de cuivre.

Les lentilles sont stérilisées par la vapeur.

Les lentilles sont emballées par plaquette de blisters individuels. N'utiliser que si les blisters sont intacts.

INDICATION

Les lentilles de contact AIR OPTIX[®] et AIR OPTIX[®] AQUA sont indiquées pour la correction optique de la vue chez des personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime qui ne gêne pas leur vue.

Les lentilles de contact AIR OPTIX[®] for ASTIGMATISM sont indiquées chez des personnes nécessitant une correction additionnelle pour l'astigmatisme. Les lentilles de contact AIR OPTIX[®] AQUA MULTIFOCAL sont indiquées chez des personnes nécessitant une correction additionnelle pour la presbytie.

Toutes ces lentilles sont indiquées pour un port journalier ou flexible/prolongé (jusqu'à 6 nuits y compris pendant le sommeil), selon les indications de votre ophtalmologiste.

PORT RECOMMANDE ET FREQUENCE DE RENOUVELLEMENT

Dans l'intérêt de maintenir la santé et la protection de vos yeux, le mode de port doit être déterminé par votre ophtalmologiste.

Les lentilles de contact à base de lotrafilcon B ont été conçues pour être portées sur la base d'un port continu jusqu'à 6 nuits (y compris pendant le sommeil). Vous ne devez pas porter ces lentilles durant le sommeil sauf si votre ophtalmologiste vous a prescrit un mode de port continu.

Après avoir passé une nuit sans porter de lentilles, commencez la période de port suivante.

En fonction des spécificités individuelles, votre ophtalmologiste peut vous recommander un port continu sur des périodes plus courtes.

Tous les porteurs de lentilles ne pourront pas atteindre la durée maximale de 6 nuits en port continu. Les lentilles doivent être jetées et remplacées par une nouvelle paire chaque mois.

MANIPULATION DE VOS LENTILLES

Votre ophtalmologiste vous communiquera des informations détaillées concernant la pose et le retrait des lentilles de contact.

Il faut toujours se laver et se sécher les mains avant de manipuler les lentilles.

Agitez délicatement le blister avant l'ouverture. Retirez la pellicule qui recouvre le blister. Faites glisser la lentille dans la paume de votre main, ou, si nécessaire, retirez doucement la lentille hors du blister avec votre index. Assurez-vous que la lentille est dans le bon sens et que c'est bien celle de l'œil à corriger. Examinez la lentille avant de la poser. Ne la posez pas si elle est endommagée.

Lors du retrait de la lentille, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches. Clignez des yeux complètement, à plusieurs reprises, et ensuite, en regardant vers le haut, faites glisser la lentille vers le bas sur la partie blanche de l'œil. Enlevez la lentille en la pinçant doucement entre le pouce et l'index. Si la lentille est difficile à retirer, ne pas pincer le tissu oculaire. Instillez une goutte de solution de lubrification et d'hydratation et essayez à nouveau après quelques minutes.

N'utilisez jamais de pinces, de ventouses adhésives, d'objet pointu ou les

ongles pour enlever les lentilles de leur étui/du blister ou des yeux.

ENTRETIEN DES LENTILLES

- UN ENTRETIEN CORRECT DE VOS LENTILLES EST ESSENTIEL.
- DECONTAMINEZ vos lentilles chaque fois que vous les enlevez, ceci afin de détruire les germes pathogènes et assurer un usage à la fois sûr et confortable des lentilles de contact.
- Votre ophtalmologiste doit choisir le système d'entretien des lentilles le plus approprié à votre cas. Il vous est recommandé les produits suivants pour vos lentilles de contact :
 - Solutions de décontamination au peroxyde d'hydrogène
 - Solutions de décontamination multi-fonctions
 - Solutions de rinçage
 - Comprimés de déprotéinisation
 - Gouttes lubrifiantes et hydratantes
- Consultez votre ophtalmologiste avant d'utiliser d'autres produits d'entretien.
- N'alternez pas et ne mélangez pas les produits d'entretien de différents systèmes.
- N'utilisez que des solutions de décontamination pour lentilles de contact souples conformément aux instructions du fabricant.
- N'EFFECTUEZ PAS DE NETTOYAGE THERMIQUE ET N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DESTINES AUX LENTILLES DURES OU RIGIDES PERMEABLES AUX GAZ.

N'oubliez jamais :

Il convient de toujours vous laver les mains, de les rincer et de les sécher avant de manipuler vos lentilles de contact.

Ne conservez jamais les lentilles toute la nuit dans une simple solution saline. La solution saline NE protégera NI vos lentilles, NI vos yeux, des germes pathogènes et par conséquent, d'une infection éventuelle.

Ne réutilisez jamais la solution d'entretien de votre étui à lentilles.

N'utilisez jamais de solutions après leur date de péremption.

Rincez votre étui à chaque fois que vous en sortez vos lentilles. Utilisez de la solution saline stérile ou une nouvelle quantité de la solution d'entretien et, si nécessaire, laissez-le sécher à l'air. Ceci contribuera à éviter une contamination et des lésions graves aux yeux.

Remplacez régulièrement votre étui à lentilles.

SI VOUS N'AVEZ PAS PORTE VOS LENTILLES DURANT QUELQUES JOURS, suivez les instructions de la notice d'utilisation de votre solution d'entretien pour lentilles de contact et, si nécessaire, nettoyez et décontaminez vos lentilles avant de les poser.